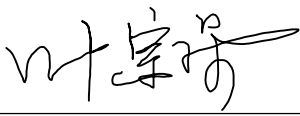


淮北市中医院磁共振屏蔽工程设计方案

工程编号: MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

设计: 

审核: 

批准: 

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

屏蔽场地设计: 叶河宝 13775004763

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司


公司地址Address:
常州市钟楼区邹区镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:
淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
屏蔽施工图纸封面

图纸设计Edited: 
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

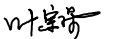图纸审核checked: 
图纸批准Ratify: 

出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:

版本edition: 第 01 版
修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书面授权, 不得使用、抄袭和复制。

所有尺寸均需做实地核对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

土建施工图纸目录

- 第1页：图纸封面
- 第2页：施工图纸目录
- 第3页：屏蔽工程施工总说明
- 第4页：西门子原始平面布局图
- 第5页：土建施工平面布置图
- 第6页：磁体吊装平台及说明
- 第7页：磁体间土建施工剖面图1
- 第8页：磁体间土建施工剖面图2
- 第9页：SBS防潮施工图
- 第10页：土建施工立面布置图
- 第11页：土建开洞尺寸列表
- 第12页：空调上下水施工图
- 第13页：MR系统配电示意图（西门子提供）

- 第14页：MR辅助配电示意图（联影提供）
- 第15页：操作间插座开关布局图
- 第16页：设备间插座开关布局图
- 第17页：失超管及系统桥架布置图

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹区镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:

淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
屏蔽施工图纸目录

图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:

出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:

版本edition: 第 01 版
修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司，未经本公司书面授权，不得使用、抄袭和复制。
所有尺寸均需做实地核对对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

淮北市中医院磁共振屏蔽工程施工总说明

医院方面：负责扫描间、设备间、操作间的土建基础工程及扫描间双层防潮层的铺设，各预留洞的开凿（进磁体预留洞、屏蔽门预留洞、观察窗预留洞、空调进回风口预留洞、传导板预留洞、滤波器预留洞）操作间设备间门窗或隔断以及照明开关、供电插座、网络插座底盒及线管预埋等应在屏蔽施工材料到达医院前施工完毕。提供施工用电及施工照明，提供一间20m²带锁的房间，用于堆放屏蔽材料。

- 1、医院应保证操作间、设备间墙面的平整度和光洁度，墙面为光面精粉刷，平整度误差应小于2mm。操作间地面为正负零水泥压光地面或贴地砖，平整度误差整体小于5mm,设备间地面与操作间地面相同
- 2、磁体间应为空房间，墙面粉刷无特殊要求。所有电器电线、暖气片、自来水管等一切有隐患的设施必须全部拆除或改道。
- 3、客户应仔细确认布局的合理性，如观察窗的大小、空调进回风口的位置、特别是屏蔽门的位置及开向。如果您感觉屏蔽门的开向不合理请在屏蔽材料发货前书面通知屏蔽公司，同时还要得到屏蔽公司的回传确认后即可改动。如果在屏蔽材料进场以后再行改动，所发生的一切费用将有客户承担，特此申明。
- 4、磁体间的照明插座必须是单独的线路（三相380V），应避开漏电保护器。因为屏蔽间的所有照明插座用电必须通过电源滤波器过滤外界干扰源。而电源滤波器在工作中会有放电现象，如果屏蔽室照明插座线路接在漏电保护器内，电源将无法正常供电。

特别提示：本图只作为设备安装前场地准备的指导与要求,具体施工请院方遵照有关国家建筑设计标准及规范进行施工。
(本图非建筑设计图，不能作为建筑图纸使用)

如有疑问请拨打电话 13775004763 与叶河宝联系

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹区镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:

淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
屏蔽工程施工总说明

图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:

出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日 比例SCALE:


版本edition: 第 01 版 修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司，未经本公司书面授权，不得使用、抄袭和复制。
所有尺寸均需做实地核对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

复制和发布此文件须经三方事先同意。未经许可，不得复制或发布。本文件一经复制或发布，即视为侵权。侵权必究，侵权必究，侵权必究。

Reproduction, publication to any third party and use of this document is not permitted except it is explicitly granted. All rights reserved by the law of copyright and by international copyright conventions and may be protected by court proceeding for damages and/or injunctions and costs.

created by AutoCAD 2007LT

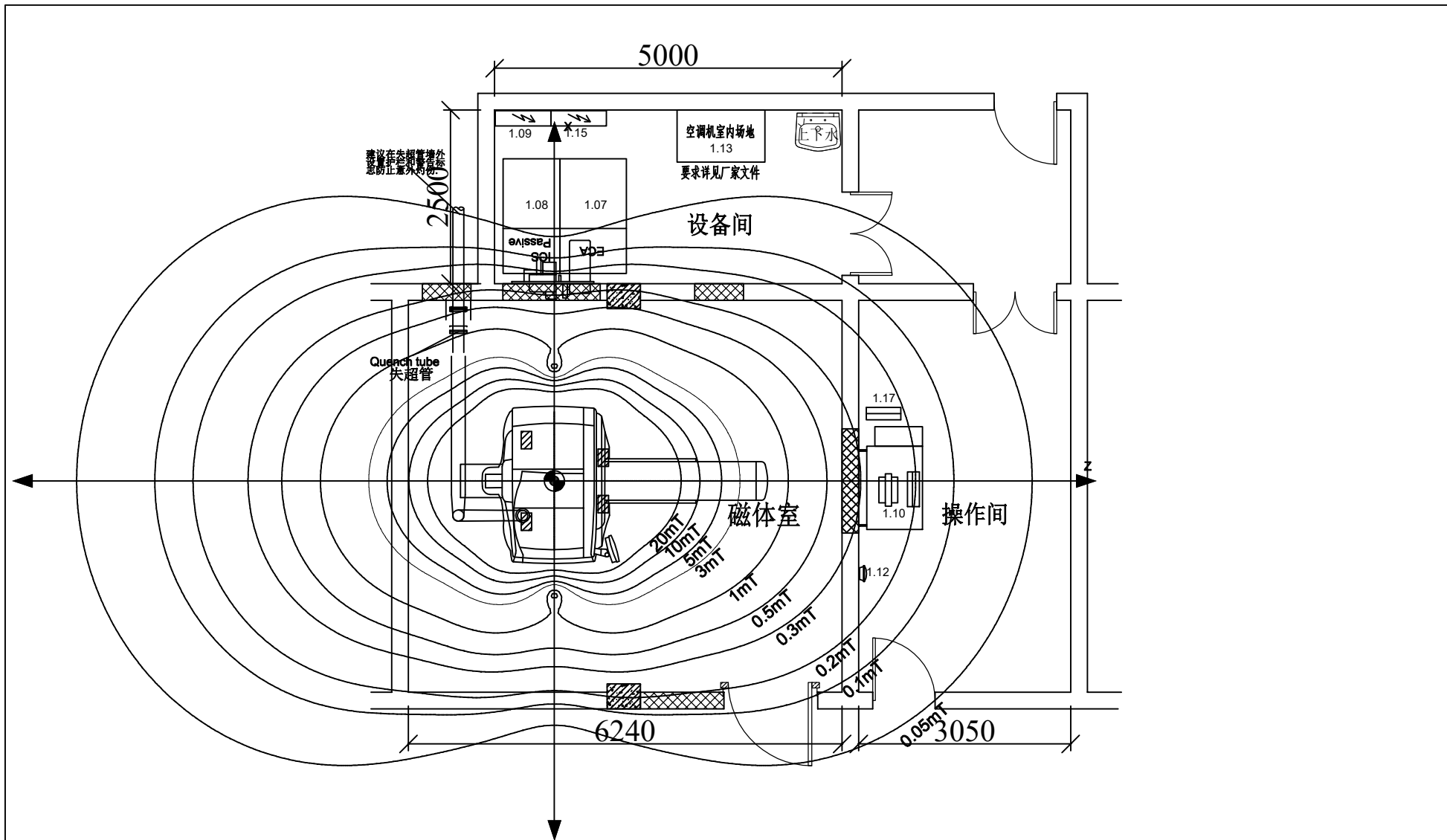

Customer Release Acknowledgement 用户确认
本机房设备安装和布局符合要求，该布局为最终方案。

Name 姓名

Signature 签字/盖章

Date 日期

(用户可保留此方案提供正式机房布局图一次，如用户要求更改此方案用户可保留原图外收费的权利)

Drawn by: 00	NAME: 00-jp-00	2022* 6月 12日	Checked by: 00	NAME:	00
PROJECT MANAGEMENT Project Proposal	S Tel.010 8478 8888	Medical Solutions Fax 010 8473 2282	Room height finished floor to: 0000mm Concrete ceiling: 0000 RH2 False ceiling: 0000 260cm	Scale 0m 1m 2m	1:100
安徽/淮北市中医院	System essenza	CN3120656-essenza-1207-A4LA	Page 1 of N	第1页/共N页	

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹区镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:
淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
土建施工平面布置图
(建平)


图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:


出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:
修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书面授权, 不得使用、抄袭和复制。
所有尺寸均需做实地核对对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

共 17 页 第 5 页

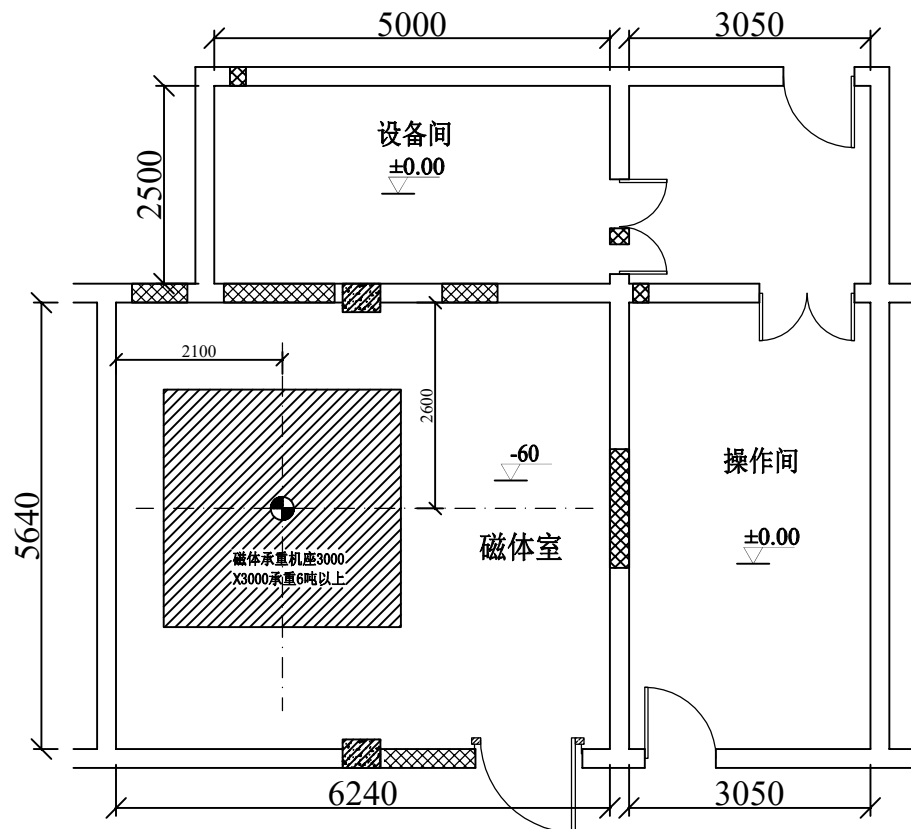

填充图标

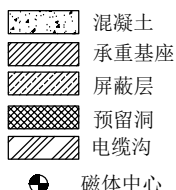

- 1、图中标尺寸均为房间内径尺寸。
- 2、图中所有预留洞均按照设备要求确定其规格和位置。
- 3、所有洞口都必须打穿, 内外尺寸一致, 除进磁体预留洞外, 其他洞口必须粉刷齐平, 严格控制洞口大小, 具体洞口位置见第4页。

梁底标高2930,
房间高度3400。

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:
淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
磁体吊装平台及医院
要准备的工具说明

图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:

出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:
修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书面授权, 不得使用、抄袭和复制。

所有尺寸均需做实地核对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

共 17 页
第 6 页



注: 空调、水冷机座旁
安装一自来水龙头, 方便设备清洗

室外机平台用c20混凝土浇筑, 最低厚度应不低于200mm
注: 空调、水冷机室外机平台请参照厂家文件或由厂家指导施工

注: 空调、水冷机安装平台的位置只是示意, 医院可以根据现场的实际情况选择一的位置进行浇筑。

注: 磁体间、操作间、设备间墙体为240mm
砖混结构墙(优先考虑用红砖), 墙体密封到顶。以防止设备工作时的噪声影响操作人员和其他科室(不可使用轻质砖砌墙)。

注: 磁体吊装平台的位置及进磁体路线只是示意, 医院可以根据现场的实际情况选择最方便、快捷、安全的进磁体路线。

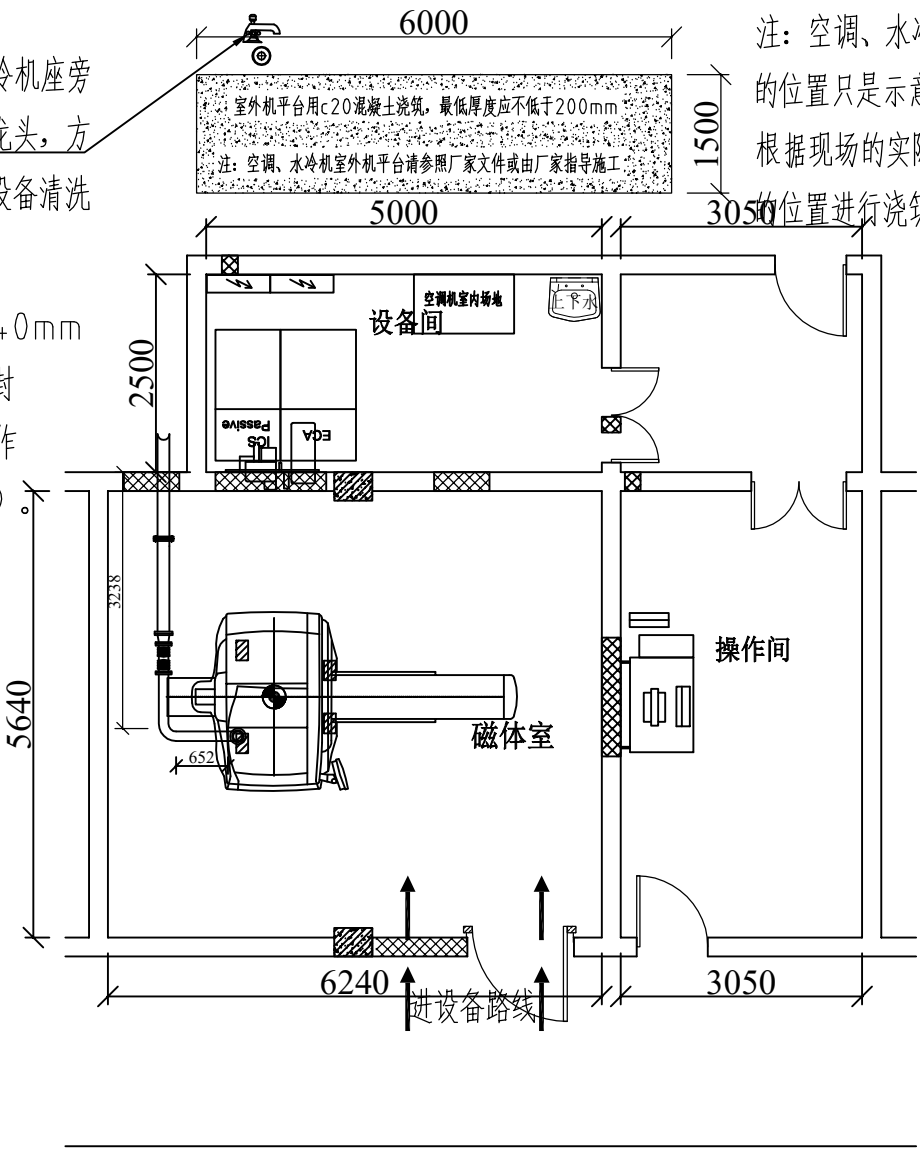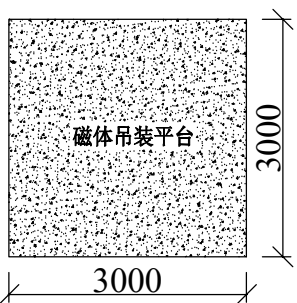

注: 在进磁体洞口搭建一个3米x3米的临时磁体吊装平台, 要求承重达到6吨以上(与磁体间最终地面高度一致), 待磁体进入磁体间后拆除该平台。部分医院磁体吊装处距离磁体间很远, 有可能要经过几个房间, 这就要在进磁体的第一个洞口搭建一个临时平台。在磁体到达医院前, 医院应仔细勘查磁体经过的路线, 确定地面承重情况, 同时还应确定沿磁体搬运路线的地下有无下水道、阴井和地下室等。如果有上述情况, 医院应尽早做好地面承重加固工作, 以免磁体在搬运过程中陷入地下, 造成不必要的麻烦。

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:

淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
磁体间土建施工剖面图1

图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:

出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日

比例SCALE:






版本edition: 第 01 版
修改日期date modified
2024 年 月 日


全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书面授权, 不得使用、抄袭和复制。

所有尺寸均需做实地核对对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用


共 17 页

第 7 页

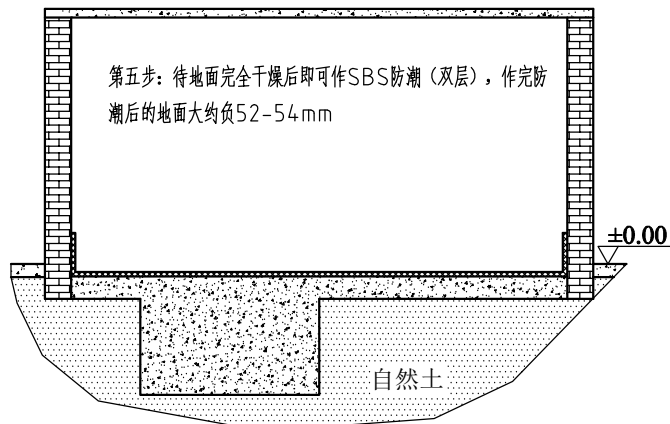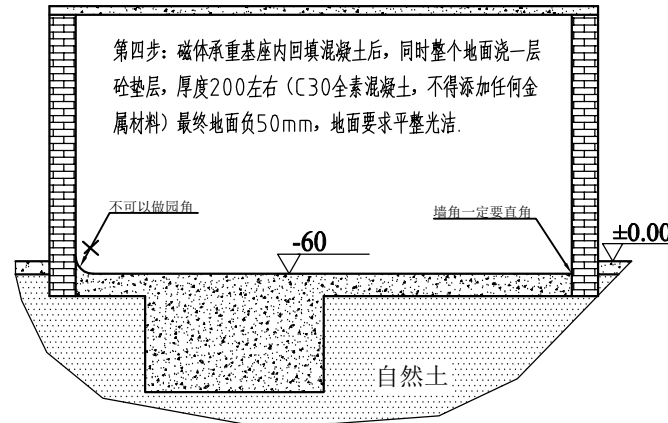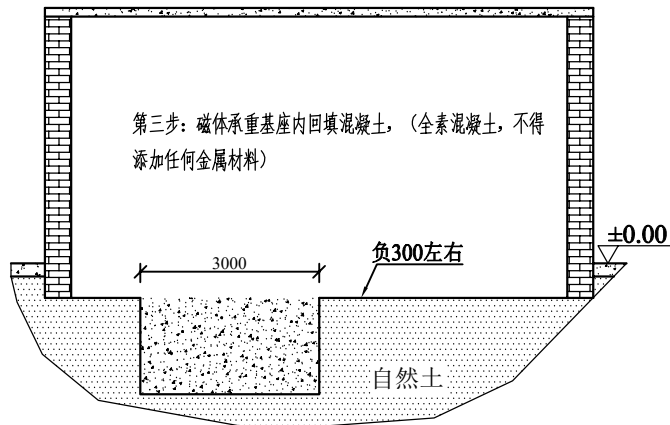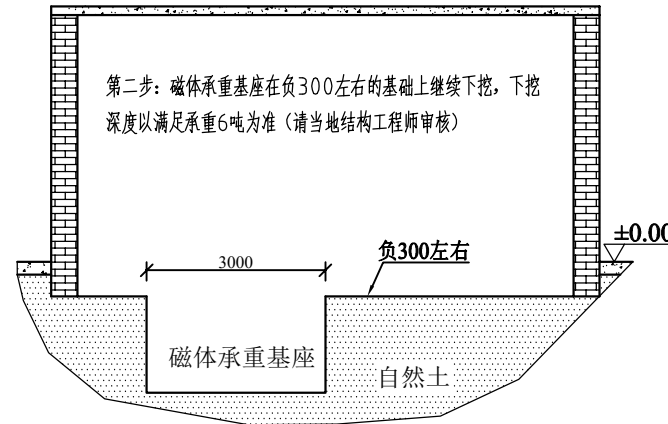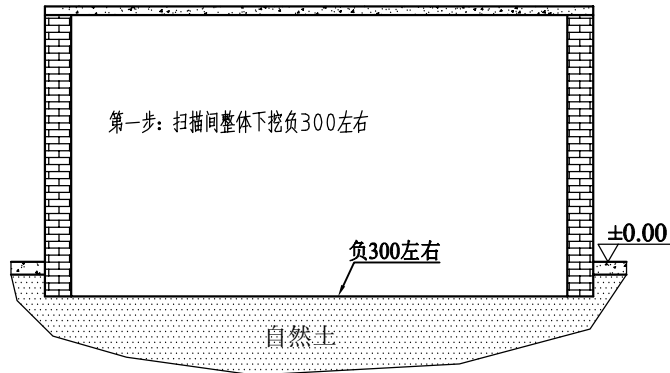

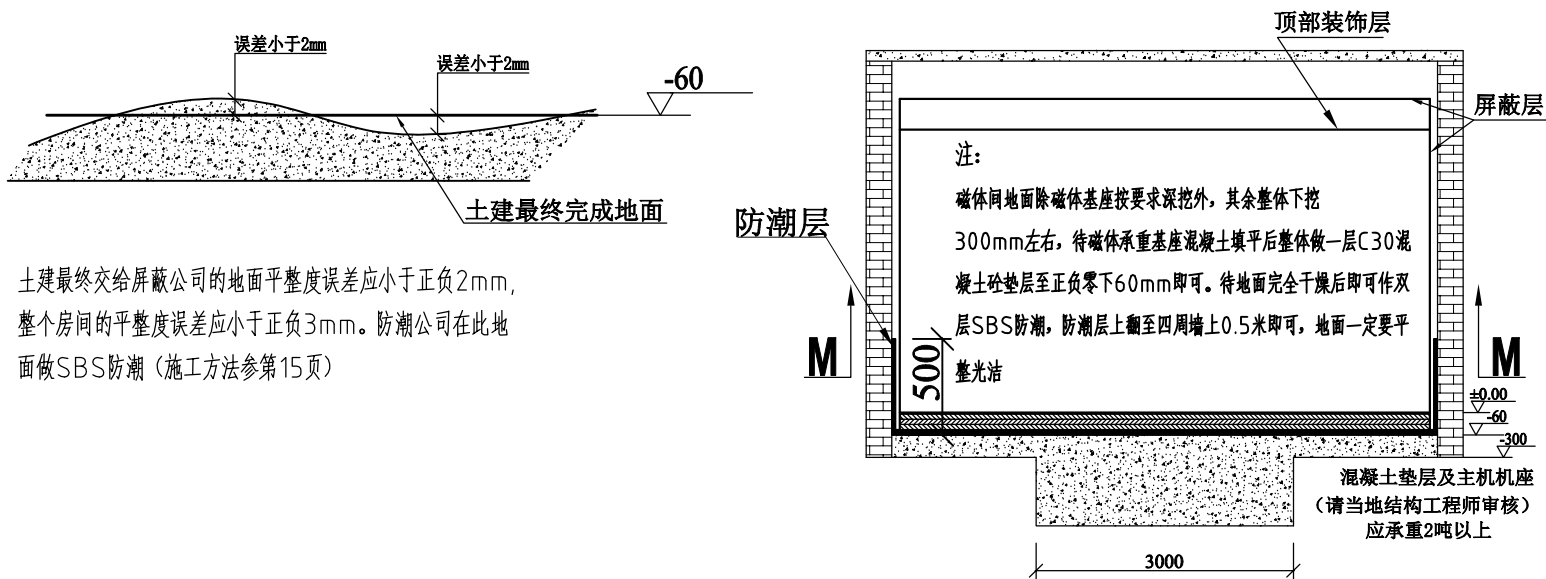

土建最终交给屏蔽公司的地面平整度误差应小于正负2mm, 整个房间的平整度误差应小于正负3mm。防潮公司在此地面做SBS防潮 (施工方法参第15页)

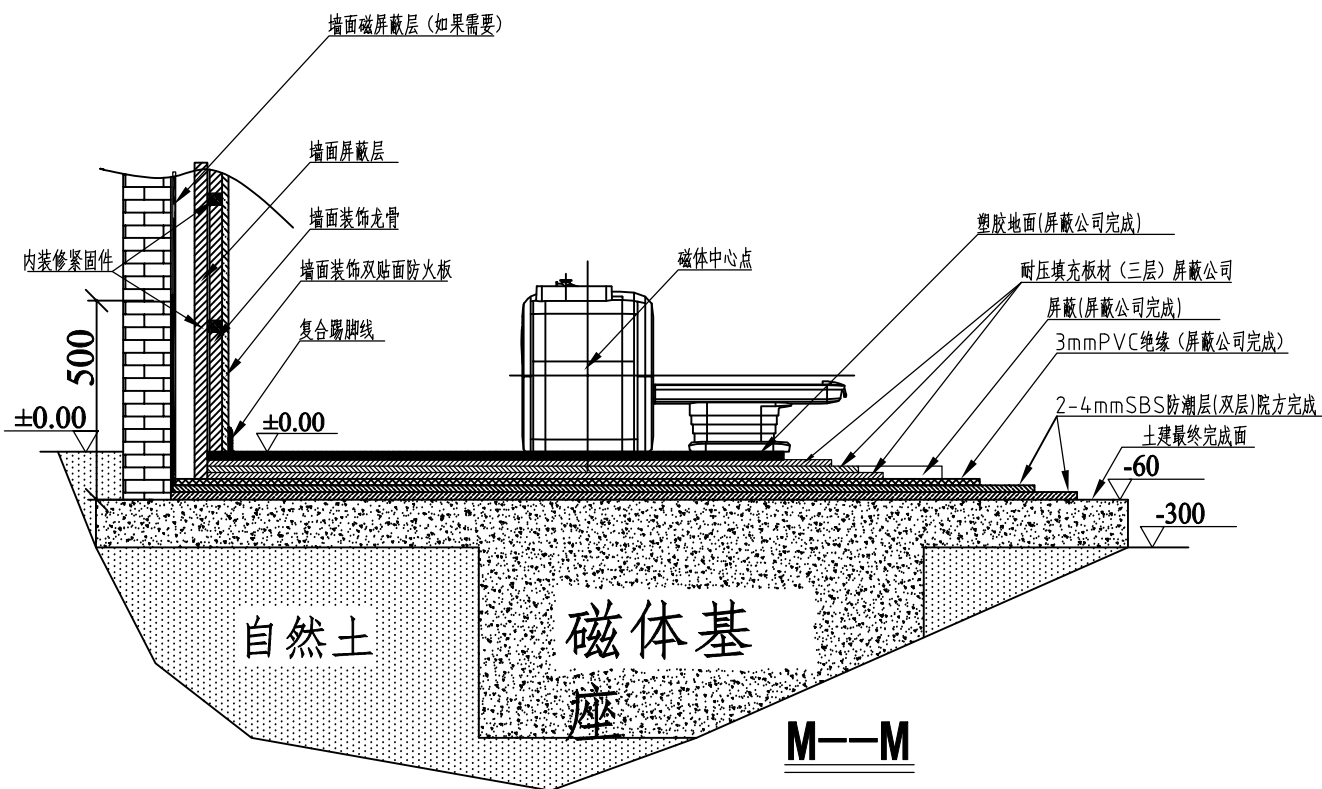

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:
淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XYZ-Essenza

图纸名称TITLE:
磁体间土建施工剖面图2

图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:

出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:
版本edition: 第 01 版
修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书面授权, 不得使用、抄袭和复制。
所有尺寸均需做实地核对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:

常州市钟楼区邹镇广源路132号33幢

电话Tel:

0518-88837711

邮编Postcode:

213000

传真Fax:

0519-88867711

医院名称Hospital:

淮北市中医院

图纸编号drawing number:

MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:

SBS防潮施工图

图纸设计Edited:

电话Tel:13776004763

邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:

图纸批准Ratify:

出图日期DATE

2024 年 12 月 01 日

比例SCALE:

版本edition: 第 01 版

修改日期date modified





2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书面授权, 不得使用、抄袭和复制。

所有尺寸均需做实地核对对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

共 17 页

第 9 页

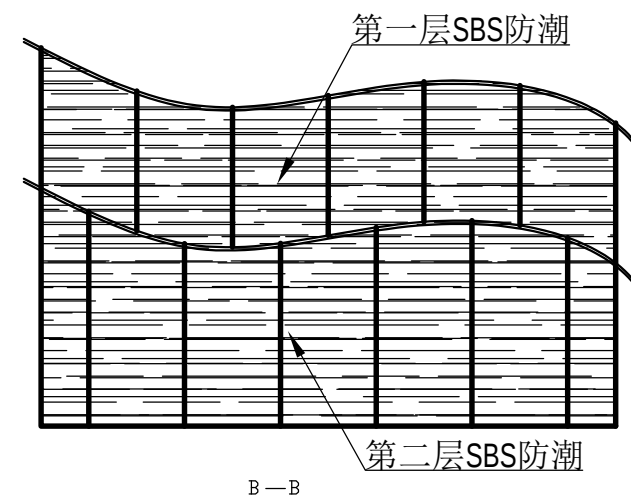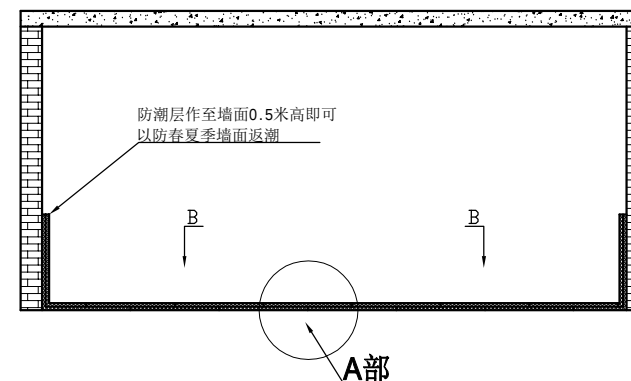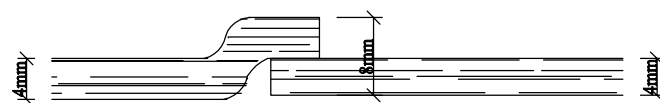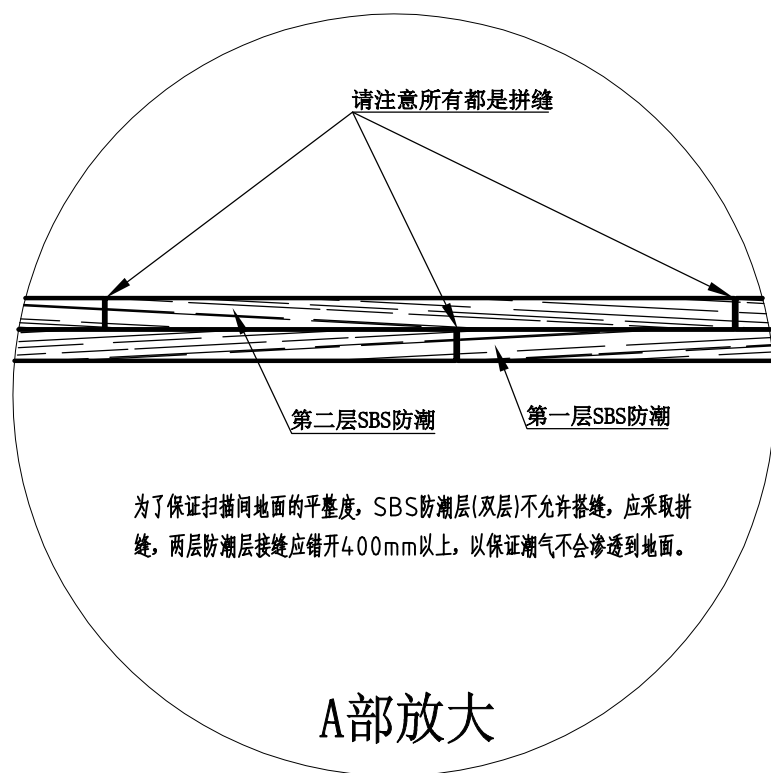

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹区镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:

淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
±建筑施工平面布置图
(建平)


图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:

出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:
修改日期date modified
2024 年 月 日
版本edition: 第 01 版

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书面授权, 不得使用、抄袭和复制。
所有尺寸均需做实地核对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

共 17 页 第 页

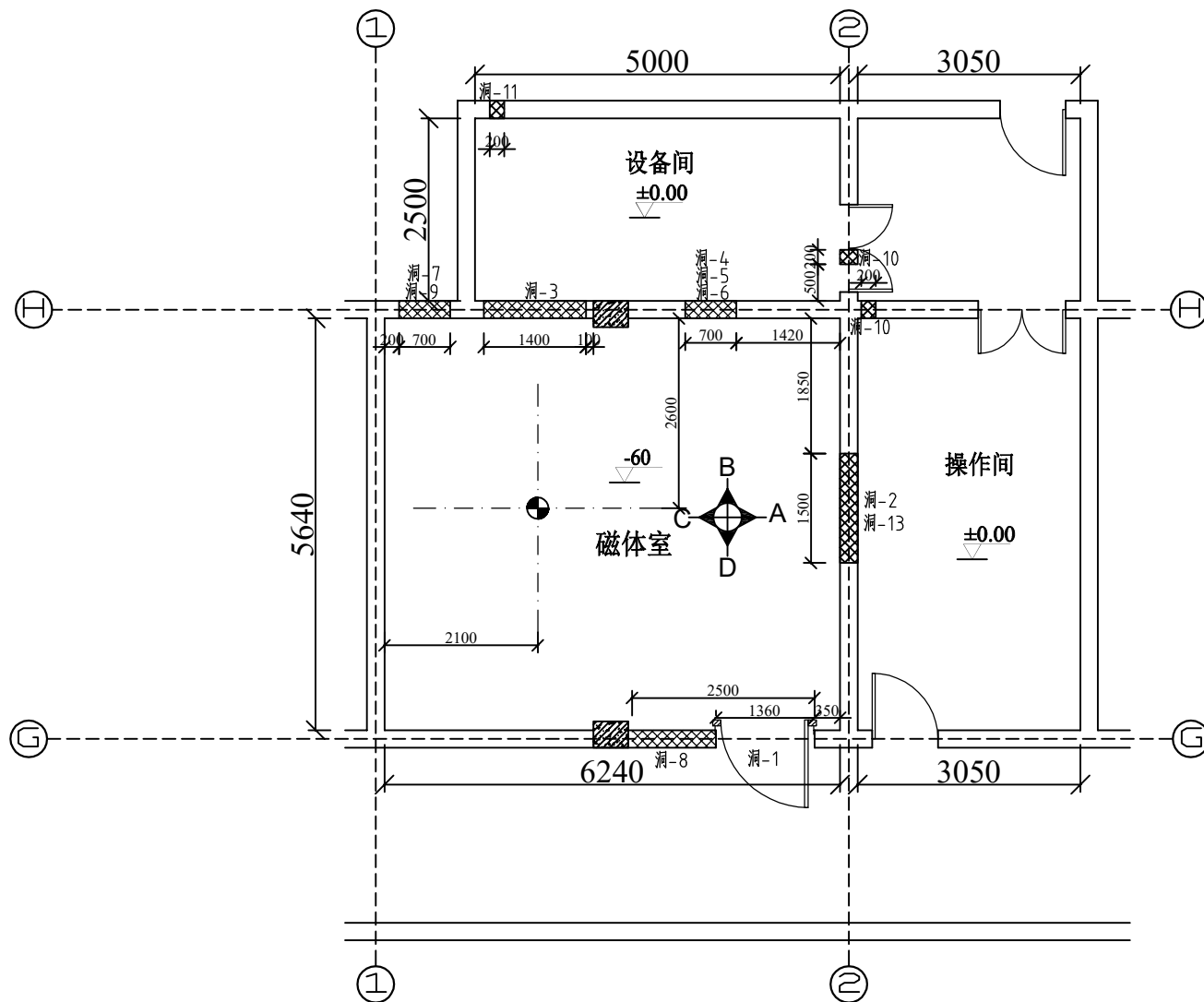

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:

常州市钟楼区邹区镇广源路132号33幢

电话Tel:

0518-88837711

邮编Postcode:

213000

传真Fax:

0519-88867711

医院名称Hospital:

淮北市中医院

图纸编号drawing number:

MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:

土建施工立面布置图

图纸设计Edited:

电话Tel:13776004763

邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:

图纸批准Ratify:

出图日期DATE

2024 年 12 月 01 日

比例SCALE:

版本edition: 第 01 版


修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书面授权, 不得使用、抄袭和复制。

所有尺寸均需做实地核对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

共 17 页

第 10 页

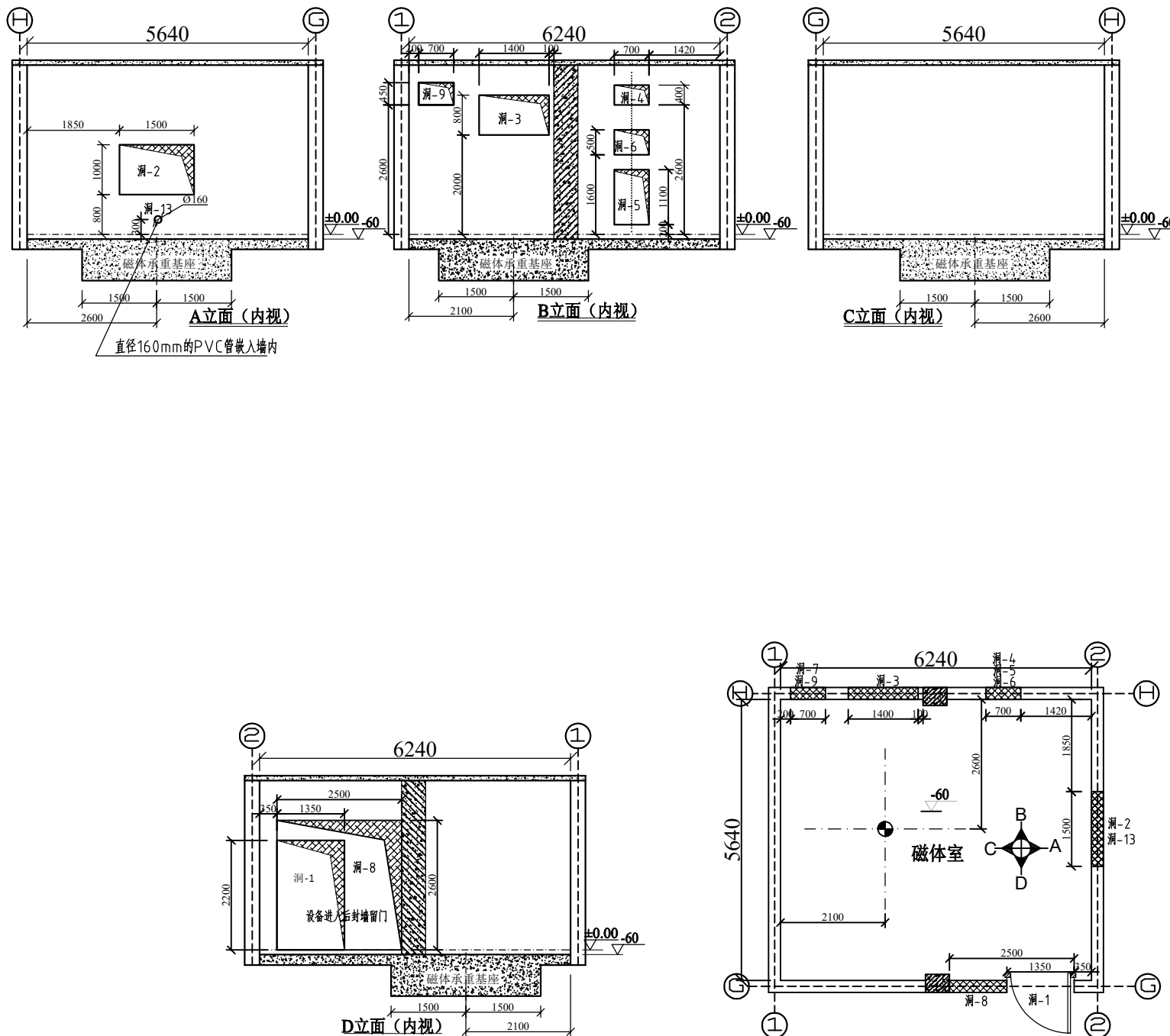

公司地址Address:
常州市钟楼区邹镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:

淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
预留洞开洞尺寸列表
(结施3-1)

图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:

出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:


版本edition: 第 01 版
修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天
屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书
面授权, 不得使用、抄袭和复制。


所有尺寸均需做实地核对本图纸不能
作为建筑施工图纸或文件直接使用

各预留洞开洞尺寸列表


序号	预留洞名称	规格	洞底标高
洞-1	屏蔽门预留洞	1360宽×2200高	正负零向上开洞
洞-2	观察窗预留洞	1500宽×1000高	正负零上800向上开洞
洞-3	传导板预留洞	1400宽×800高	正负零上2000向上开洞
洞-4	空调进风口预留洞	700宽×400高	正负零上2600向上开洞
洞-5	空调回风口预留洞	700宽×1100高	正负零上200向上开洞
洞-6	滤波器预留洞	700宽×500高	正负零上1600向上开洞
洞-7	失超管预留洞	700宽×450高	正负零上2600向上开洞
洞-8	进磁体预留洞	2500宽×2600高	正负零向上开洞
洞-9	紧急排风预留洞	700宽×450高	正负零上2600向上开洞
洞-10	系统走线预留洞	200宽×200高	正负零上2800向上开洞
洞-11	空调室内外机连接洞	200宽×200高	正负零向上开洞
洞-12			
洞-13	高压注射洞口(备选)	φ160PVC管埋入墙体	正负零350向上开洞

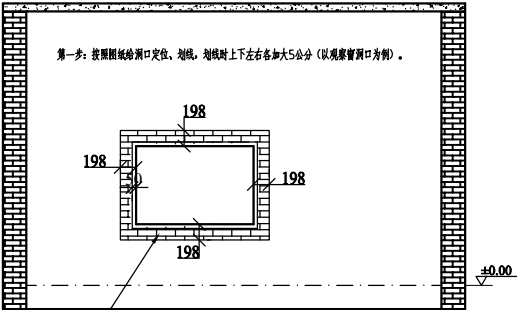


注: 为了保证磁共振机房的施工质量, 所有土建洞口周边200mm均需使用红砖水泥砂浆结构, 严禁使用轻质砖或其他影响结构牢固性的材料。

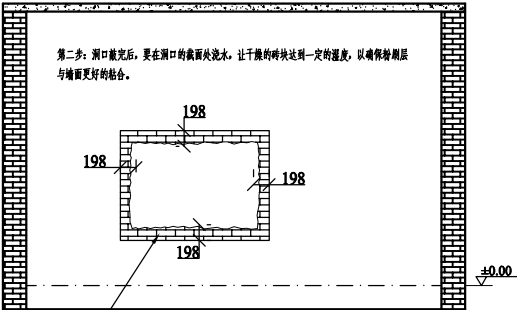

注: 为了保证磁共振机房的施工质量, 所有土建洞口周边200mm均需使用红砖水泥砂浆结构, 严禁使用轻质砖或其他影响结构牢固性的材料。

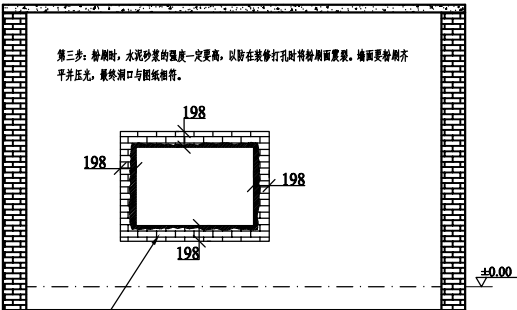


注: 为了保证磁共振机房的施工质量, 所有土建洞口周边200mm均需使用红砖水泥砂浆结构, 严禁使用轻质砖或其他影响结构牢固性的材料。

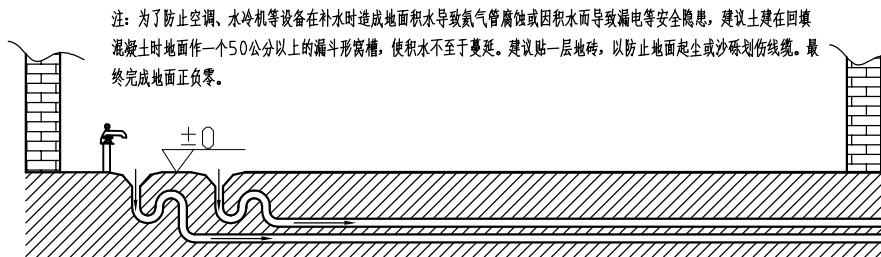


X--X


如果系统使用的是机房专用空调，医院应为每台空调分别设置与空调功率匹配三相空开一个，以及截面积与之相匹配的三相五线供电电缆引到空调位，并预留2米。

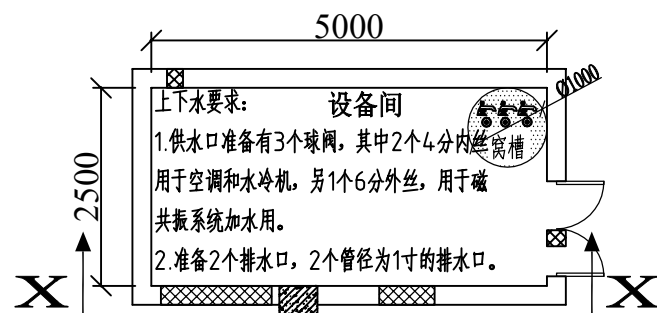

建议在水龙头的出水口正下方地面做一个直径大约一米左右，四周向地漏中心缓低的锅底形窝槽，以方便在注水管在无人看管的情况下脱落时，其开放的自来水能够及时的通过地漏排除设备间，以防止地面积水或蔓延。

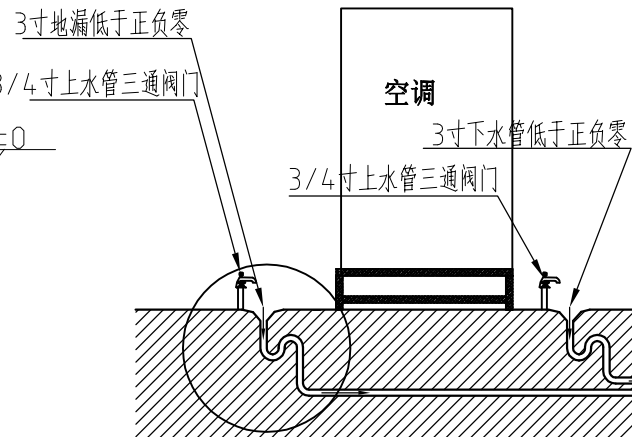

注：空调上下水及地漏施工有土建负责

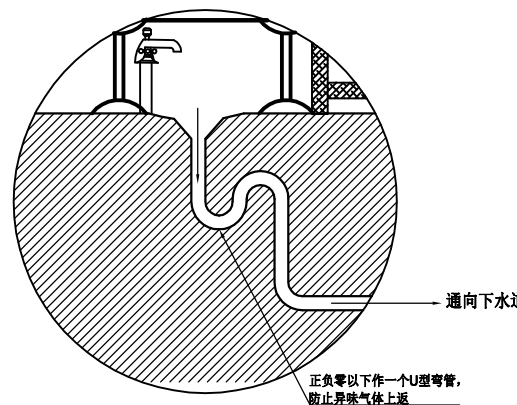

注：空调下水管可以在空调基座的正下方，上水管应高出正负零地面，水管安装一个阀门，地漏应在上水管附近。地漏和下水管口应低于正负零，四周地面向中间做小角度倾斜。

地漏和下水管通向下水道的中间部分应做一个U型弯曲，以防下水道里的气体通过地漏和下水口返上，造成磁体间和设备间气味变异。

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:

淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
设备间上下水施工示意图

图纸设计Edited(水施1)
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:

出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:
修改日期date modified
2024 年 月 日
版本edition: 第 01 版

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司，未经本公司书面授权，不得使用、抄袭和复制。

所有尺寸均需做实地对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

共 17 页 第 12 页

MR主设备配电箱

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹区镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:

淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
MR系统配电示意图

图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:


出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:
版本edition: 第 01 版
修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书面授权, 不得使用、抄袭和复制。

所有尺寸均需做实地核对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用


共 17 页 第 24 页

图例		
①	系统接地(联合接地阻值小于1欧姆, 独立接地阻值小于2欧姆)	用户准备
②	慢熔熔断器。可使用西门子产品: 3NA3 830-2C (100A, 3P)。	
③	漏电保护器。可使用西门子产品: 3VL27 10-1EJ46-0AB1-ZA01 (100A, 30mA, 4P), 保护类型Type A。	
④	中间继电器。可选用西门子产品: 3TH8040-0XB 0(线圈AC24V, 40E)	
⑤	交流接触器: 额定工作电流 $\geq 100A$ 。可选用西门子产品: 3RT1054-1AP36 (115A, 线圈AC220V, 22E)	
VK	MR系统主配电箱	
AT	紧急停止按钮(带自锁)。可使用西门子产品: 急停按钮开关3SB3000-1HA20 + 2个常闭触点3SB34 20-0C + 空盒按钮(黄色前盖) 3SB38 01-QAB	用户准备
EAT	电源总开关(带指示灯)。可使用西门子产品: 开关按钮盒3SB38 03-0DA3 + 指示灯3SB3901-1CF (按钮盒内装有1个常开启动按钮、1个常闭停止按钮、外加1个AC230 LED指示灯) [安装控制室内]	
#1	用户准备的配电箱面板启、停按钮	
REPO	工作站UPS急停联锁(若有)	西门子提供
ECA/ICS	西门子MR系统机柜	

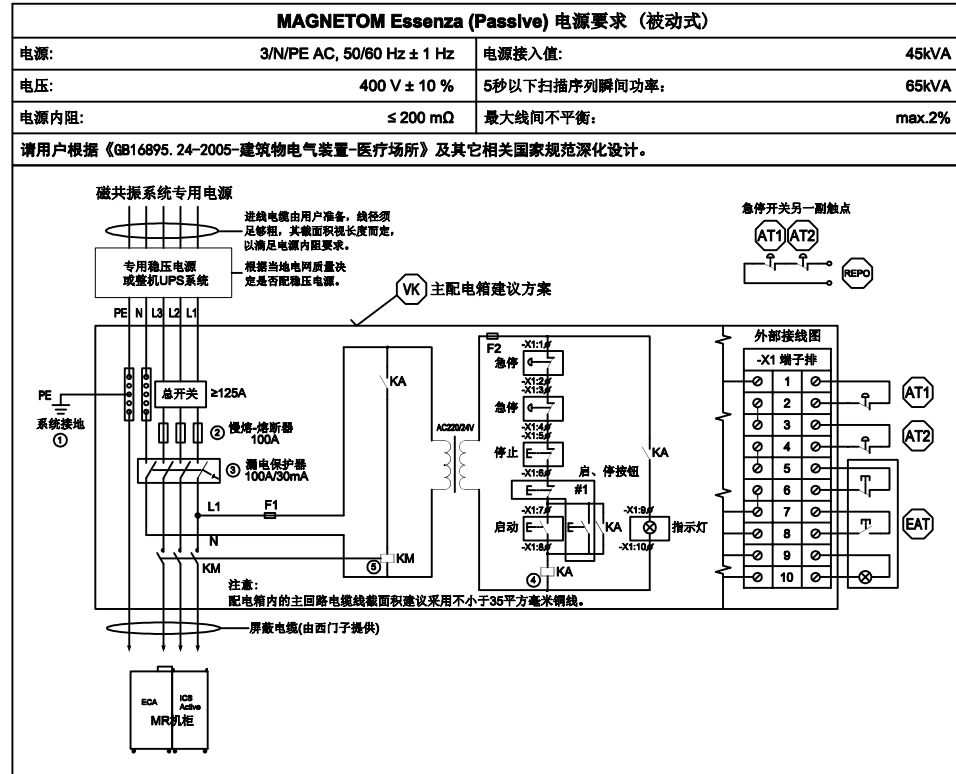

Essenza

MR辅助设备配电箱

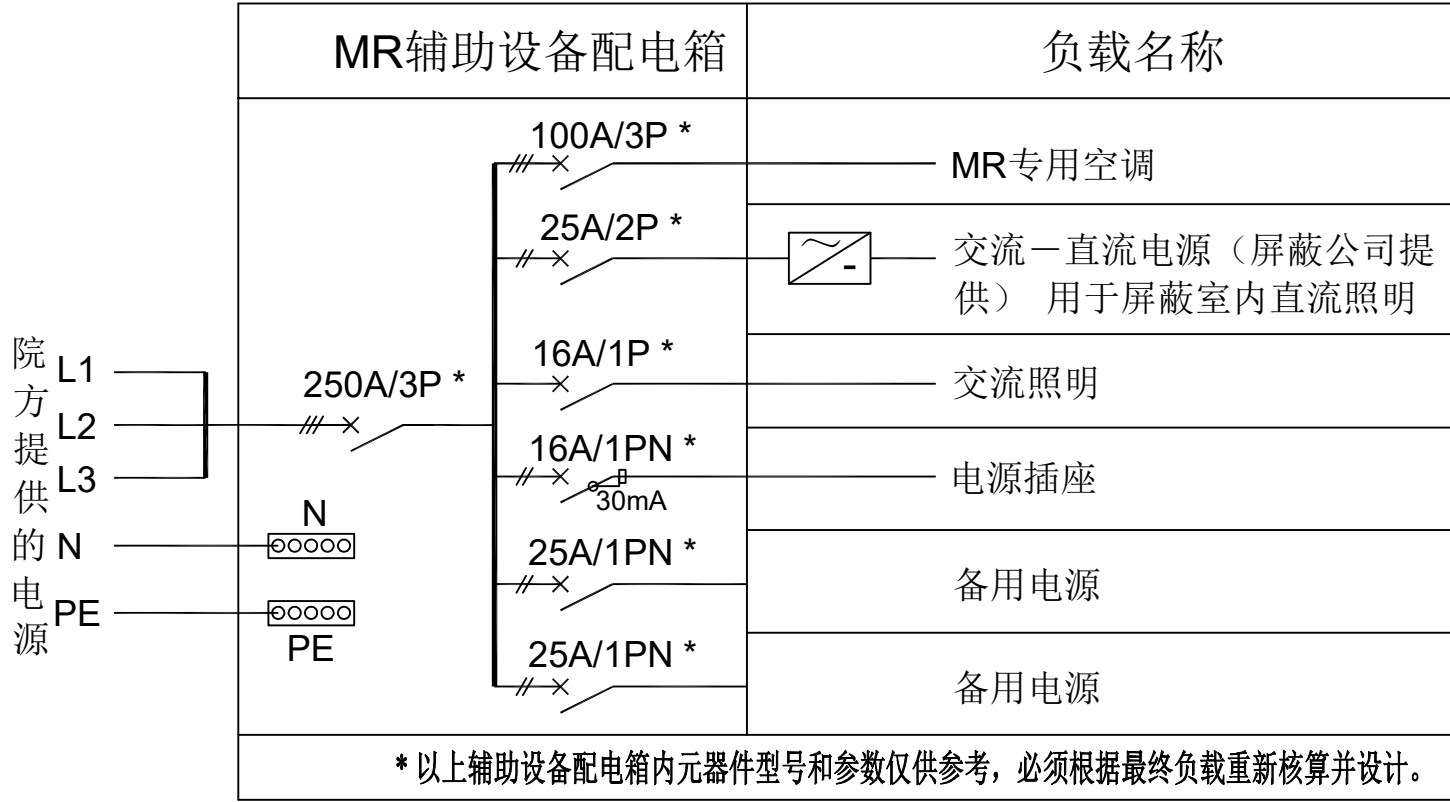

Essenza

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹区镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:
淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
MR系统配电示意图



图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:






出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:

版本edition: 第 01 版
修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司，未经本公司书面授权，不得使用、抄袭和复制。
所有尺寸均需做实地核对对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

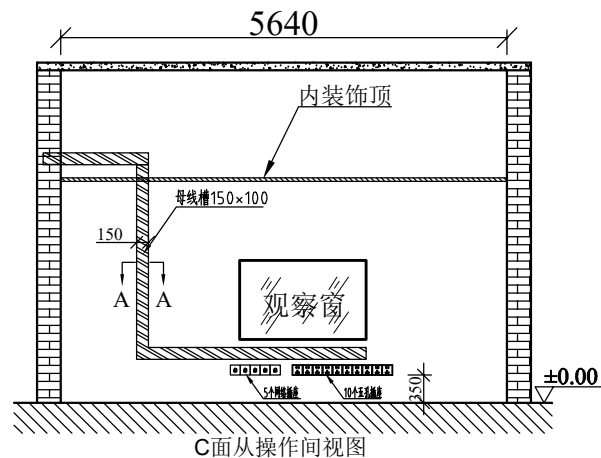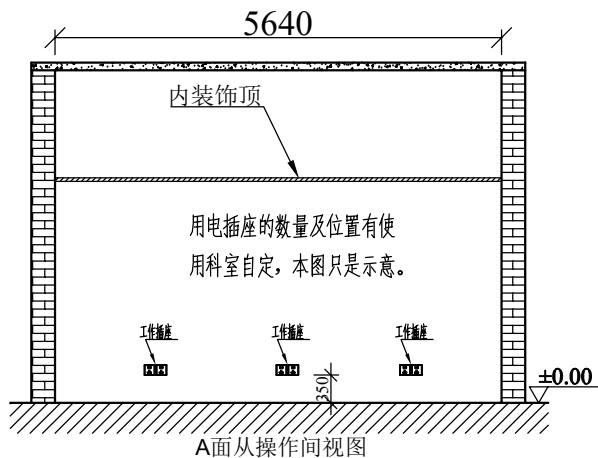

注：土建在时应将网络、插座及照明开关安装好，以确保不会反复破坏墙面。开关插座底盒型号为86的方盒，穿线管使用 $\varnothing 20$ 的阻燃PVC管，网络安装医院应请专业部门施工。

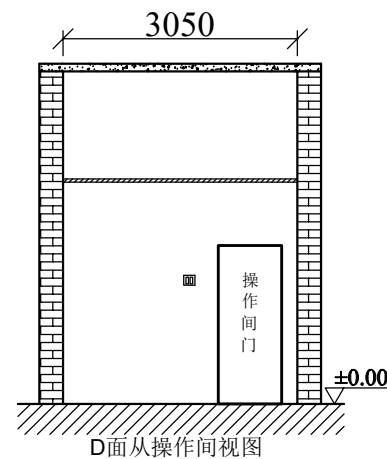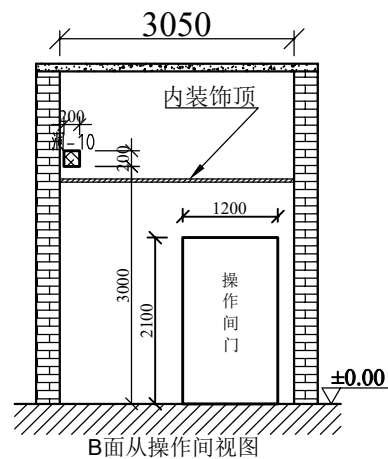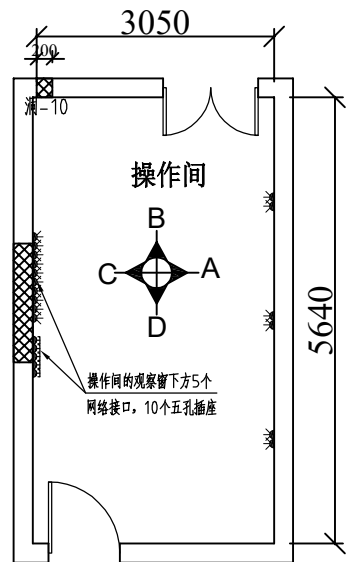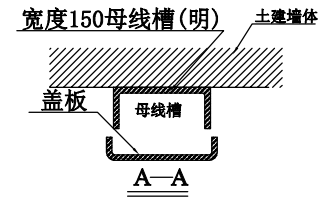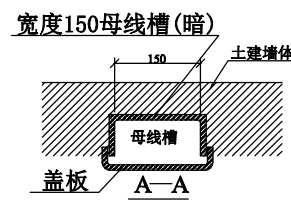

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:

淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
操作间插座开关布局图
(结施1-1-1)




图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:



出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:
修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书面授权, 不得使用、抄袭和复制。
所有尺寸均需做实地核对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用


共 17 页
第 15 页

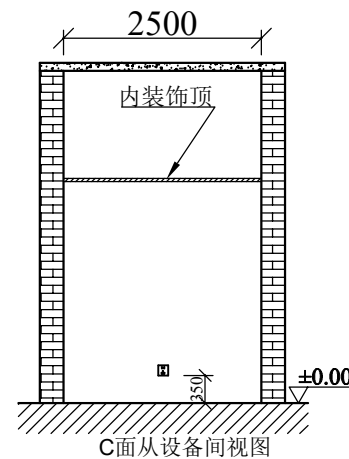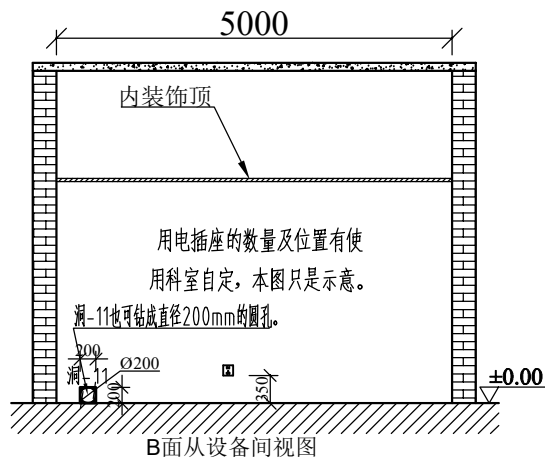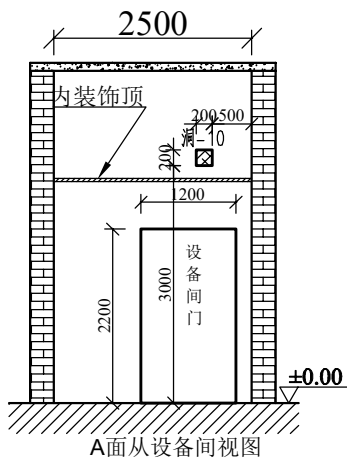

注：洞-11的大小及高低位置请咨询设备厂家的技术部门，但有一点必须明确，就是洞口的底部标高比外地面至少高150mm左右，以防止雨水倒灌。

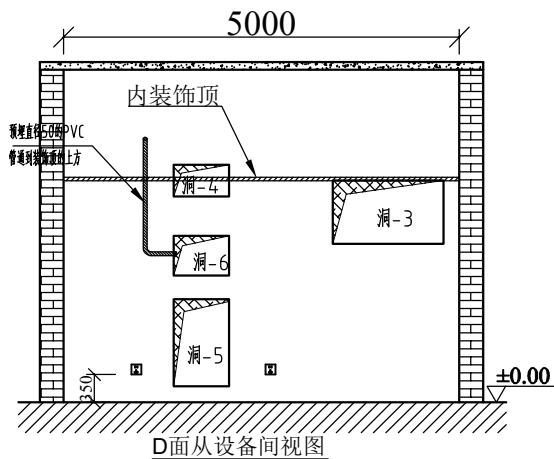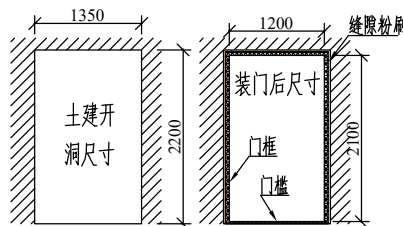

洞-11空调及水冷机室外机与室内机连接洞口的位置只是示意，具体位置由医院根据现场实际情况而定，但这个洞口必须得有

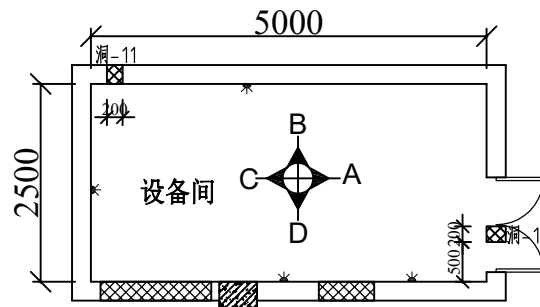

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:

淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
设备间插座开关布局图
(结施1-1-2)

图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:

图纸批准Ratify:

出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日

比例SCALE:

版本edition: 第 01 版
修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司，未经本公司书面授权，不得使用、抄袭和复制。

所有尺寸均需做实地核对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

共 17 页

第 16 页

常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司

公司地址Address:
常州市钟楼区邹区镇广源路132号33幢
电话Tel:
0518-88837711
邮编Postcode:
213000
传真Fax:
0519-88867711

医院名称Hospital:
淮北市中医院

图纸编号drawing number:
MRI-1.5T-24188-TP-XMZ-Essenza

图纸名称TITLE:
失超管及系统桥架布置图

图
图纸设计Edited:
电话Tel:13776004763
邮箱E-MAIL:ye.hebao@163.com

图纸审核checked:
图纸批准Ratify:

出图日期DATE
2024 年 12 月 01 日
比例SCALE:

版本edition: 第 01 版
修改日期date modified
2024 年 月 日

全部图纸设计及说明之版权属于常州市天屏电磁屏蔽设备有限公司, 未经本公司书面授权, 不得使用、抄袭和复制。
所有尺寸均需做实地核对对本图纸不能作为建筑施工图纸或文件直接使用

共 17 页
第 17 页

